


V31/V33系列病床分机 使用手册

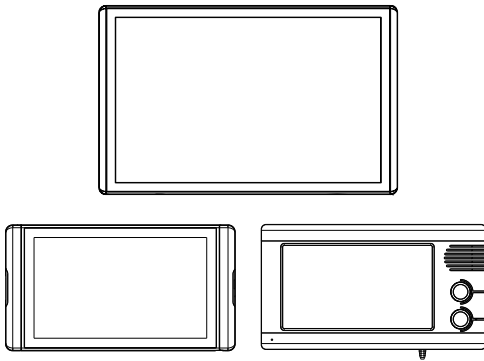



欢迎选用我公司的病床分机产品!

BC210SL70/BC210SL10/BC210L70采用当今最先进的电子通信技术设计,以优良的SMT工艺生产,经过严格的质量保证体系的测试与检验,具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点,为值得信赖的病床分机产品。

装箱清单(表中配件可能根据型号不同而有所增或减)

序号	名称	数量	
1	病床分机	1台	
2	说明书	1本	
3	合格证	1张	
4	配件包	1套	配件包单独包装,内含:挂板、电源线、电源适配器、配线等。不同型号产品配件包可能有所不同,以实物为准。

一、产品简介

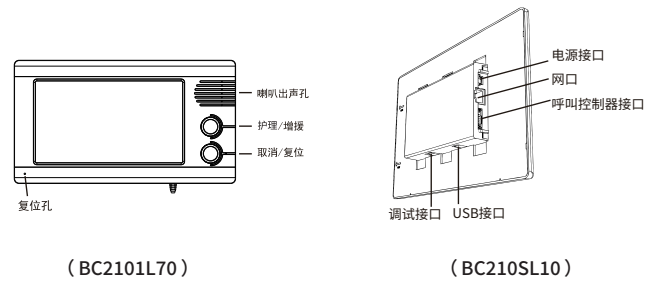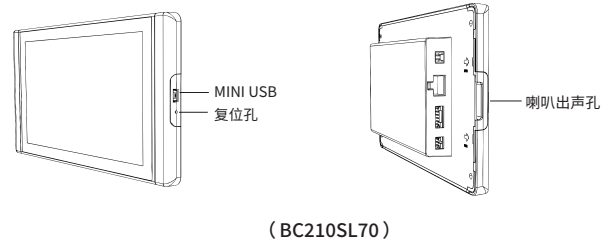

二、号码设置


进入病床号设置功能,正确输入该病床分机的号码,按确认键系统提示设置成功并自动重启。

如果输入号码不在房号表中,则系统显示“号码不存在”;如果号码没改变,则系统显示“设备号码无修改!”。


温馨提示:房号要根据房号表填写,每台病床分机设备都会分配一个固定IP,且设备IP都不相同,设置正确的房号后系统将自动更改设备IP地址。

三、安装说明

BC210SL70/BC210L70病床分机安装说明

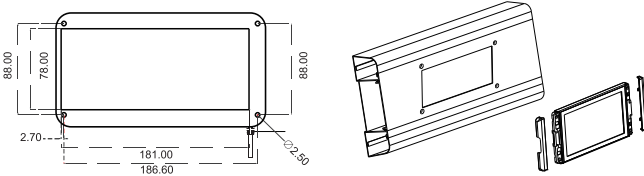

BC210SL10病床分机安装说明


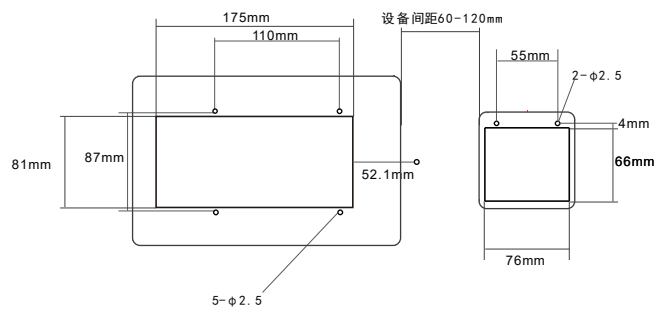


一、设备带开孔

1.按照图纸尺寸在设备带上开孔

二、安装病床分机

- 1.将线槽的网线、电源线等功能线接口插到病床分机上
- 2.将病床分机用4颗M3*10盘头自攻螺丝固定在安装面板上
- 3.将病床分机两边的装饰盖对准卡扣位后扣在病床分机上,拆卸时需要用两个手指按压装饰盖的卡扣位然后向外推即可
- 4.将病床分机的手柄固定铁片贴上背胶粘在设备带上
- 5.将病床分机的手柄挂在铁片上即可安装完毕

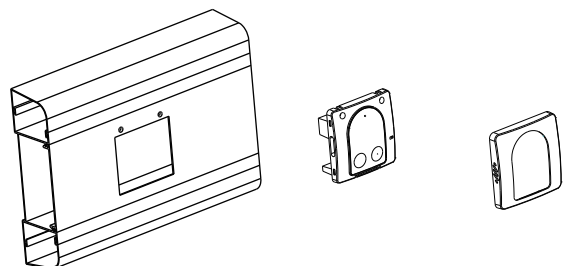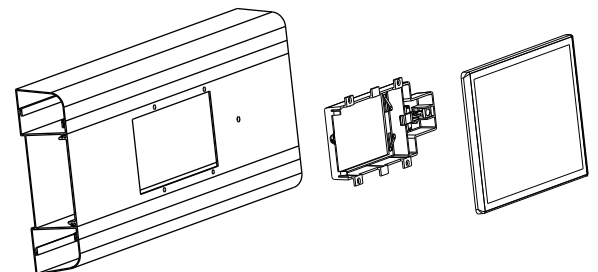

一、设备带开孔

1.按照图纸尺寸在设备带上开孔


二、安装病床分机

- 1.将预埋盒组件用4颗M3*8沉头自攻螺丝固定在安装面板上
- 2.将线槽的网线,电源线等功能线接口插到病床分机上
- 3.将病床分机与预埋盒组件卡扣对准后按压进预埋盒组件上


三、安装呼叫控制器

- 1.将线槽的网线,电源线等功能线接口插到呼叫控制器上
- 2.将呼叫控制器倾斜一定角度后对准开孔位置卡进设备带上,再用2颗M3*8沉头自攻螺丝将呼叫控制器固定
- 3.将呼叫控制器面盖对准卡位按压装进呼叫控制器


四、接口接线说明

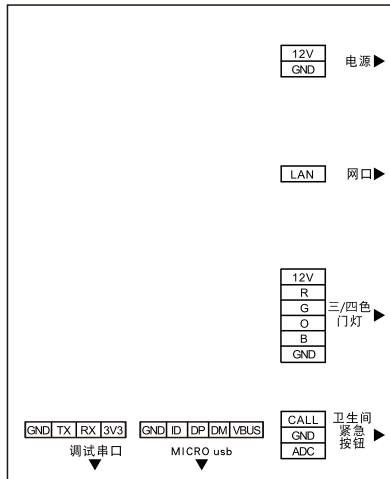

(BC210SL70)

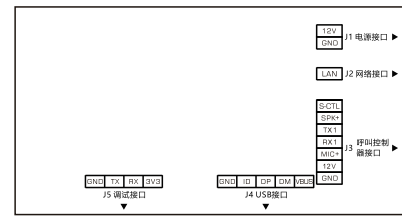

(BC210SL10)

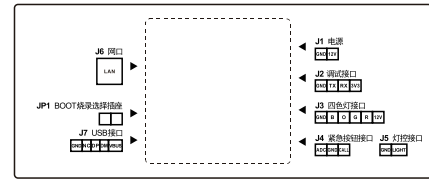

(BC2101L70)

五、技术参数

产品型号	BC210SL70	BC2101L70	BC210SL10
供电电压	DC12V	DC12V	DC12V
最大功耗	5W	5W	10W
工作温度	-10°C to 50°C	-10°C to 50°C	-10°C to 50°C
工作湿度	10% to 95%	10% to 95%	10% to 95%
联网接口	RJ45 10M/100M	—	RJ45 10M/100M
安装方式	设备带安装	设备带安装	设备带安装
整机尺寸	200*110*10mm(外露) 200*110*26.8mm(整机)	230*128*20.5mm	242*153*8mm(外露) 242*153*24mm(整机)

六、故障分析与排除

如系统不正常,断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因,请通知代理销售商或厂家,不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

简单故障排除表

序号	故障现象	故障原因分析	排除方法
1	开机后屏幕无反应	电源线接插座是否插稳或接错	1、检查电源线是否有电压或插好 2、连接线是否接好 3、转接板是否正常
2	无法按键操作	1、上电按键是否有背光 2、按键板是否松动	1、检查按键板连接
3	无法连接云平台	1、网络是否接通 2、机器注册编号错误重复 3、设备IP,路由器IP是否正确	1、检查设备网络连接 2、设置机器编号 3、设备IP和路由器IP重设 4、是否连接备用IP服务器
4	可开锁,但无抓拍视频	网络线是否插好,或摄像头被遮挡	1、检查电源线是否有电压或插好 2、连接线是否接好 3、转接板是否正常
5	用户不能开锁	外接开锁模块或门禁卡故障	检查或更换开锁模块或门禁卡

为维护您的权益,请您认真填写,并妥善保管,作为维修时的凭证:

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
用户信息	销售日期	
	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
用户信息	销售日期	
	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	